

Self-sticking tender tape

SPITA ResQ-plast®

SENSITIVE

MEDISCH
goedgekeurd



HYPO-
allergeen

PIJNLOOS VERWIJDERBAAR



Om een wondkussen te maken, vouwt u het eerste deel om, en eventueel nog een keer, zodat de gewenste dikte ontstaat. Het wondkussen dient minimaal de bloedende wond te kunnen bedekken.

Het wondkussen op de wond plaatsen en vervolgens **SPITA ResQ-plast** iets uitrekken en gelijkmatig omwikkelen. De wikkelingen (ca 4-5) dienen van links naar rechts (of rechts naar links) elkaar (kruislings te overlappen, waarna u de band kunt afscheuren. Het einde stevig op de onderliggende laag aandrukken voor een goede hechting.

***Wij adviseren bij een open wond eerst een geschikt desinfectiemiddel toe te passen.**

Omdat de wijze van aanbrengen en de omgevingsfactoren buiten de controle van de fabrikant vallen, kunnen zowel de fabrikant als al haar distributeurs niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik of verkeerd gebruik van dit product en de eventuele directe, indirecte of incidentele letsels en de speciale of gevolgschade van deze letsels. **SPITA ResQ-plast** is een geregistreerd handelsmerk van G&G Investments B.V., Zeewolde (NL).



Bewaartermijn:
>5 jaren bij opslag
in het donker.

SPITA ResQ-plast is uitstekend toepasbaar bij:

- (bloedende) wonden aan vingers, tenen, enz.
- Snijwonden
- Blaren
- Als drukverband
- Gewrichtsblessures
- Ingescheurde nagels
- Natte en/of vette huid

WAARSCHUWING:

Indien u **SPITA ResQ-plast** te strak omwikkelt, kan de bloedcirculatie worden gehinderd. In dit geval het materiaal afwikkelen en vervolgens minder strak aanbrengen.

TIP:

SPITA ResQ-plast is langdurig houdbaar. Bewaar **SPITA ResQ-plast** in de bijgeleverde (hersluitbare) verpakking om onnodige vervuiling van het pleistermateriaal te voorkomen.

SPITA Smart Products B.V.

Industrieweg 18-9
3846 BD Harderwijk

Tel.: 0341 - 41 49 93

www.resqplast.nl

Bijzondere eigenschappen van SPITA ResQ-plast:

- Voorkomt pleisterallergie
- Zelfhechtend
- Actief ademend
- Zeer elastisch
- Waterbestendig
- Bestand tegen zalf, olie en vet
- Kleeft niet aan huid of haar
- Latexvrij